

器(47) 類別注射針及び穿刺針
歯科用貼薬針 70679000

再使用禁止

販売名：マイクロブラシプラス

【禁忌・禁止】

- 再使用はしないこと。
- 感染防止のため、清潔なものを使用すること。

【形状・構造及び原理等】



型番：マイクロブラシプラス ファイン
ディスペンサー付セット

マイクロブラシプラス ファイン
補充用

マイクロブラシプラス レギュラー
ディスペンサー付セット

マイクロブラシプラス レギュラー
補充用

マイクロブラシプラス サンプルパック

成分：

アプリケーター作業部：プラスチックファイバー
アプリケーターハンドル部：プラスチック
ディスペンサー：プラスチック

【品目仕様等】

FDA, ISO 9001: 2008 の規準に対応

【性能・使用目的・効能又は効果】

口腔内で貼薬を行う。シーラント、ボンディング、ライニング、フッ素塗布等に使用のディスポーザブルブラシ。
アプリケーター先端は塗付部位によって角度調整が可能。大きな窩洞部分へのプライマー、ボンディングの塗付にも使用可能。

【操作方法又は使用方法等】

アプリケーターカートリッジをディスペンサーに装着し、左右いずれかのハンドルを回転させ、一本ずつアプリケーターを取り出して使用する。塗布部位、または必要に応じてアプリケーター先端部の角度を調整して使用。補充用アプリケーターを装着し、ディスペンサーは繰り返しの使用が可能。

【使用上の注意】

器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
使用目的以外に使用しないこと。必要以上の力を加えないこと。
破損や事故の原因となるので、切削・打刻・曲げなどの改造は絶対に行わないこと。
1回限りの使用で使い捨てることとし、再使用は避けること。
マイクロブラシ以外の補充はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。
汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。
水分が付着したまま保管しないこと。

【包装】

ディスペンサー付セット
アプリケーター：100本入り×4箱
ディスペンサー：1個

補充用
アプリケーター：100本入り×4箱

マイクロブラシプラス サンプルパック：7本入り

【文献請求先】

〒176-0013
東京都練馬区豊玉中2-18-14
株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ
住所：〒176-0013
東京都練馬区豊玉中2-18-14
電話番号：03-3557-4111(代表)
第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Young Microbrush LLC
(アメリカ合衆国)