

再使用禁止

器(65) 歯科用充填器
歯科用充填・修復材補助器具 38782000
販売名：マイクロスティックス

【禁忌・禁止】

- ・再使用はしないこと。
- ・感染防止のため、清潔なものを使用すること。

【形状・構造及び原理等】



型番：オリジナルホールド（ブルー）
強粘着性

成分：アプリケーター軸部：プラスチック
アプリケーター作業部：ホットメルト

【性能・使用目的・効能または効果】

アプリケーターの先端部は接着可能なチップであり、その接着チップにラミネートベニア、インレー、オンレー、クラウン等小さい物質を接着させ、装着目的箇所に接着させる。

【品目仕様等】

FDA, ISO 9001: 2008 の規準に対応

【操作方法又は使用方法等】

アプリケーターの接着チップに小さい物質を接着させゆっくり持ち上げ、装着箇所に接着させる。接着後、軸部を軽く回すと、対象物が簡単に外れる。設置部位、または必要に応じてアプリケーターの先端部の角度を調節して使用。乾燥を防ぐ為、専用のパッケージをしっかりと閉めて保管。

【使用上の注意】

器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
使用目的以外に使用しないこと、必要以上の力を加えないこと。
接着チップの粘着力が低下した場合は使用を避けること。
患者一人限りの使用で使い捨てることとし、再使用を避けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

冷乾書に保管、社交保存すること。
汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。
乾燥を防ぐ為、必ず専用パッケージで、蓋をしっかりと閉めて保健管理すること。
保管温度：12～28
参考保存期間：30ヶ月まで

【包装】

16本入り×4ケース（64本）

【文献請求先】

〒176-0013
東京都練馬区豊玉中2-18-14
株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ
住所：〒176-0013
東京都練馬区豊玉中2-18-14
電話番号：03-3557-4111(代表)
第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Young Microbrush LLC
(アメリカ合衆国)