

再使用禁止

販売名：サリバーエジェクター 8000-CLB

【禁忌・禁止】

- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 再使用はしないこと。
- 感染防止のため、清潔なものを使用すること。

【形状・構造及び原理等】



全長：155mm

【性能・使用目的・効能又は効果】

非能動吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、歯科治療中に口腔内にたまった水分や切削片を除去する。

本品は単回使用である。

【品目仕様等】

ISO 13485:2003の規準に対応

【操作方法又は使用方法等】

排唾管

歯科専用装置に連結して、歯科治療中に口腔内に貯留する水分や切削片を除去する。

【使用上の注意】

器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。

歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

使用目的以外に使用しないこと。

先端とチューブは一体型ではなく、スポット接着により組み立てている構造となっている。接着剤がはがれ、先端がチューブから外れる可能性があるため、必要以上の力を加えないこと。

破損や事故の原因となるので、切削・打刻・曲げなどの改造は絶対に行わないこと。

使用前に十分な洗浄・消毒をすること。

使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液や精製水に付けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。

洗浄後は乾燥させて保管すること。

血液、体液、組織及び薬品が付着したまま保管しないこと。

汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。

水分が付着したまま保管しないこと。

【包装】

一袋100本入り

封印：加熱シーリングにより密閉し、塵や埃が混入せず、一度開封されたことが明確に分かるように包装されている。

【文献請求先】

〒176-0013

東京都練馬区豊玉中2-18-14

株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ

住所：〒176-0013

東京都練馬区豊玉中2-18-14

電話番号：03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Hsiner Co., Ltd. (台湾)