

器 (51) 医療用嘴管及び体液誘導管  
単回使用歯科用吸引カニューレ 37434000

再使用禁止

販売名：ソフトチップ アスピレーター

【禁止】

- 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 器具の形態変更や改造等はないこと。
- 長期使用した場合や機能の低下が目立った場合は使用を中止し、適切に廃棄すること。

【形状・構造及び原理等】



全体長：155mm

(原材料)

塩化ビニール + 銅メッキ針金

【性能・使用目的・効能又は効果】

- 非能動吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いるものをいう。
- 本品は単回使用である。

【品目仕様等】

国際規格 ISO13485:2003 に従って製造されている。

【操作方法又は使用方法等】

- 使用前に十分な洗浄・消毒をすること。
- 非能動吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結する。
- 本品は単回使用を目的として製造された製品である。

【使用上の注意】

器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守る事。  
歯科医療有資格者以外は使用しないこと。  
使用前に必ず洗浄・消毒すること。  
使用前に必ず点検をすること。  
(汚れ・傷・曲がり・破損等の以上がないか)  
使用目的以外に使用しないこと。必要以上の力をくわえないこと。  
破損や事故の原因となるので、切削・打刻等の改造は絶対に行わない事。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。  
汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。  
乾燥した場所に保管すること。水分が付着したまま保管しないこと。  
錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。  
ヨードグリセリンなどの科学薬品と一緒に収納保管しないこと。  
使用有効期間は特にないが、機能の低下が目立った場合は使用を止めること。

【包装】

- 封印：加熱シーリングにより密閉し、塵やほこりが混入せず、一度開封されたら開封されたことが明確に分かるように包装されている
- 入り数  
2本入り（サンプルキット）  
20本入り（箱入）  
100本入り（箱入）（20本入り包装×5セット）

【文献請求先】

株式会社コサカ  
〒176-0013 東京都練馬区豊玉中2-18-14

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

<製造販売業者>  
株式会社コサカ  
〒176-0013 東京都練馬区豊玉中2-18-14  
03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

<外国製造業者>  
ASA Dental S.p.A. (イタ)