

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋 40549000

バイोजェル スキンセンス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

** 【形状・構造及び原理等】

本品は、非天然ゴムであるポリクロロブレンゴムラテックスからなる、滅菌済みの使い捨て手術用ゴム手袋である。

1. 形状

- ・形状C（曲指形手袋）
- ・表面仕上げP（表面が平滑な手袋）
- ・パウダナシ
- ・左右の区別あり

2. 材質

ポリクロロブレンゴムラテックス

【使用目的、効能又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護すること。

【品目仕様等】

試験項目		性能
促進老化前	切断時引張力	12.5N以上
	切断時伸び	600%以上
	300%伸び引張力	2.0N以下
促進老化後	切断時引張力	9.5N以上
	切断時伸び	500%以上

** 【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと本品を取り出す。
2. 無菌操作にて本品を装着する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 包装が破損又は汚損していた場合、もしくは製品に破損、汚損、ピンホール等の異常が認められた場合は、使用しないこと。
- (2) 包装を開封したら、直ちに使用すること。
- (3) 使用中、穴が開いたり破れたりした場合は、新しい製品と交換すること。

**2. 相互作用

- (1) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので注意すること。

**3. その他の注意

- (1) 電気メス等の使用において、高周波電流の形成により熱傷を起こす可能性があるため、注意すること。
- (2) 使用後の廃棄の際は、感染防止に配慮し適切に処分すること。

** 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
使用期限は外箱に記載。（自己認証データによる。）

** 【包装】

サイズ5.5～8.5 : 200 双入/箱 (50 双×4)
サイズ9.0 : 160 双入/箱 (40 双×4)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

** 製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
電話 03-6914-5006

* 製造業者（国名）：

メンリッケヘルスケア Sdn. Bhd. (マレーシア)
Molnlycke Health Care Sdn. Bhd.