

歯 (09) 歯科用研削材料
歯科用ゴム製研磨材 70903000

販売名：ユニバーサルビッグポイント HP Kタイプ

【警告】

- 指定の最高許容回転速度(回転数)を越えて使用すると、切削中に破折し、人体を傷つける恐れがあるので、指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。
- タービンメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを必ず確認すること。
- 本品は未滅菌である。使用する前は適切な方法で消毒してから使用すること。


【禁止】

- 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 器具の形態変更や改造等はしないこと。
- 長期使用した場合や機能の低下が目立った場合は使用を中止し、適切に廃棄すること。

【形状・構造及び原理等】

軸部：ステンレススチール

作業部：人造研削材(炭化けい素)をシリコンゴムで結合した軸付研磨材

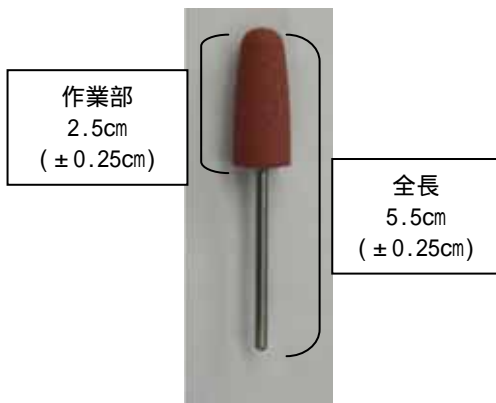

【品目仕様等】

ISO13485とCEの品質基準に基づいて品質管理が行われている。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用電気エンジン、マイクロモーター、高速レーズに装着し、レジン床、各個トレー、歯冠用硬質レジン及び硬質レジン歯を研削・研磨する。

1-STEPタイプ 中仕上げ用

レジン床及びレジン床と金属床の境目の研磨にも使用できる。

回転数 10,000 ~ 15,000r.p.m で使用すること。

【使用上の注意】

- 回転数 10,000 ~ 15,000r.p.m で使用すること。
- 使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認すること。
- 頭部が大きい形状のため、折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 本品を使用する場合は、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- 再使用する際には必要に応じ、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去し、薬剤による消毒を行うこと。オートクレーブ推奨温度(134、5分)ただし、乾燥滅菌、ケミクレーブ滅菌不可

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 清潔で湿度が高くない場所にて、保管、管理すること。
- 錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。
- ヨードグリセリンなどの科学薬品と一緒に収納保管しないこと。
- 使用有効期間は5年である。ただし、機能が目立った場合、損傷、変形、錆び、汚染等が見られた場合は使用を止めること。

【包装】

1ケース：6本入り

【文献請求先】

株式会社コサカ

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

<製造販売業者>

株式会社コサカ

住所：〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14

電話番号：03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

<外国製造業者>

コルテーン/ウェルデント社 (スイス)