

感染症の対策は
まずは優れた洗浄液の選択から!

医療器具用 酵素系洗浄剤

酵素クリーン

酵素タイプ

特長

血液、体液、タンパク質で汚染された医療器具等の洗浄に優れた洗浄力を発揮します。

成分

タンパク分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤

液性

pH8.3 (原液)

●標準使用量

- ・超音波洗浄器の場合
通常の汚れ200倍希釈 (5mL/1.0L)
※汚れの程度により100倍～200倍希釈に増減してください。
- ・浸漬洗浄の場合
通常の汚れ100倍希釈 (10mL/1.0L)
※汚れの程度により50倍～100倍希釈に増減してください。
※10～20分浸漬後、十分水ですすいでください。

■内容量：2L

■希望小売価格：

■使用期限：常温(15～25℃)で1年

◎浸漬洗浄や洗浄器を用いた洗浄に適しています。

液体酵素系洗浄剤

無リン・無泡性・低腐食性の

