

GC



ご好評につき再び実施!
 保険適用
 フジルーティング® EX Plus
発売記念キャンペーン
第2弾!

キャンペーン期間 **2022.8.1 - 8.31** 【数量限定】

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
 この度、「フジルーティング® EX Plus 発売記念キャンペーン 第2弾」を実施いたします。
 是非、この機会にご用命ください。

フジルーティング® EX Plus 1函と
キャンペーンセット品
でか見えセメントタイマー1個を
組み合わせ価格にてご提供!!



メタル補綴装置に最適!

対象製品



接着性ガラスイオンマー系レジンセメント

フジルーティング® EX Plus

色調●ライトイエロー

包装・希望医院価格●1函:

カートリッジ 13.3g(7.2mL) 2本、練和紙 (No.22) 1冊
 =¥11,800

歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント
 ジーシー フジルーティング EX Plus
 管理医療機器 303AKBZX00090000

従来品フジルーティングEXの特長

+ タックキュア
光照射 3秒

余剰セメントを一塊のまま除去できます。

セット後 **2分45秒** で最終硬化

キャンペーンセット品



立てられる
 スタンド付!



はり付けられる
 マグネット!



でか見えセメントタイマー

【期間限定販売品 希望医院価格】 ¥1,500

主な仕様●表示方式: 液晶4桁表示、設定時間: 最小1秒・最大99分59秒、アラーム時間: 約30秒、

電源: DC1.5V(単4乾電池×1本)

使用温度範囲: 0℃~+40℃

外形寸法・質量: D76×W82×H23.2mm、約75g(乾電池含む)

単4乾電池1本付属(モニター用)

関連製品

CDディスプレインサーⅢ
 エコSTOPパー

【包装・希望医院価格】 1函:1個=¥640
 一般医療機器 09B2X00010G00063

■ フジルーティング EX Plus 1クリック採取量

〈エコSTOPパー無〉

〈エコSTOPパー有〉



さらに少量
 採取したい時にオススメ


GC Fuji Luting® EX Plus

詳しい情報は裏面をご覧ください

セメンテーションに時間を費やしていませんか？

練和 **10秒**

しっかり練り込む

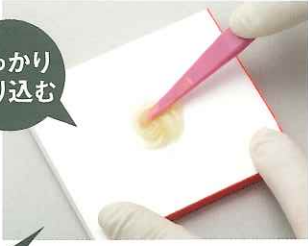

従来品「フジルーティングEX」と同様の練和感

タックキュア
光照射 **3秒**



各面
光照射
3秒

余剰セメント除去



ポロッ

口腔内セット後2分45秒で最終硬化

患者さんの回転率UP、ユニット清掃時間の確保

診療スタイルに合わせて余剰セメントの除去方法を選択できます！

タックキュア
光照射

各面3秒の光照射で
余剰セメントを **ポロッ** と除去

余剰セメントを
先に除去して空いた時間
を活用！！



次の患者さんへ カルテ記入 PC入力 片付け

化学重合

セット後1分～1分半で
余剰セメントを **ポロッ** と除去

余剰セメント
硬化までの空いた時間
を活用！！

空いた時間を有効活用！！

従来品「フジルーティングEX」と同様の
口腔内保持時間！

タックキュア
光照射 の場合



準備 30秒	練和 10秒	塗布 10秒	セット	余剰セメント 除去
準備 30秒	練和 10秒	塗布 10秒	セット	

口腔内セット後
2分45秒

最終硬化

化学重合 の場合



準備 30秒	練和 10秒	塗布 10秒	セット	余剰セメント除去まで 60秒～90秒
準備 30秒	練和 10秒	塗布 10秒	セット	

■フジルーティング EX Plus 適応症例

メタル		ジルコニア	
インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ
○	○	—	○*

*CAD/CAMレジジンブロック装着には、
ジーセム ONE ネオ、または、ジーセム ONE
EMをおすすめします。

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2022年8月1日～8月31日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL (_____) _____

お取引販売店 _____

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
フジルーティング EX Plus 1函	でか見え セメントタイマー 1個	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
営業所 ●北海道(011)729-2130
●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は

株式会社 **コサカ**

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14
TEL 03-3557-4111 FAX 03-3557-4116