

キャンペーン期間

2024.4.22 ▶▶▶ 5.20 (期間・数量限定)



# ジーセム ONE EM バリューストック 新規 & ご愛用感謝 CAMPAIGN

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。  
この度、「ジーセム ONE EM バリューストック 新規 & ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

## ジーセム ONE EM バリューストック (5本入) 1函と

キャンペーンセット品

## プライマー2種 & 採取皿 1セットを

## 組み合わせ価格にてご提供!



歯科接着用レジンセメント

## ジーセム ONE EM バリューストック 5本入

色調 ● 1色 = ユニバーサル (A2)

包装・希望医院価格 ● 1函: シリンジ (2.7mL) 5本、EMミキシングチップT40個、

EMミキシングチップF5個、EMミキシングチップF用ノズルRC5個、

テクニカルチャート1部 = ¥22,250

管理医療機器 301AKBZX00021000



ユニバーサル (A2)



キャンペーンセット品



接着強化プライマー  
1mL (特別仕様)



【期間限定販売品】包装・希望医院価格

1函: 1mL 1本 = ¥1,700

歯科用象牙質接着材

管理医療機器 228AKBZX00104000



G-マルチプライマー  
1mL (特別仕様)



【期間限定販売品】包装・希望医院価格

1函: 1mL 1本 = ¥2,800

歯科セラミックス用接着材料

管理医療機器 228AABZX00003000



\\ プライマー塗りまちがえ防止! \\



ジーセム ONE  
専用採取皿



【期間限定販売品】

希望医院価格 ¥1,000

## プライマーについての詳細は裏面へ ▶▶▶

キトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年4月22日~5月20日

貴医院名	対象製品	ご購入数	キャンペーンセット品
ご住所 〒	ジーセム ONE EM バリューストック5本入 ユニバーサル(A2)		接着強化プライマー 1mL (特別仕様) 1本 + G-マルチプライマー 1mL (特別仕様) 1本 + ジーセムONE 専用採取皿 1個
TEL ( )			
お取引販売店			

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。  
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

# 支台歯の前処理

## 接着強化プライマー

スピーディーなタッチキュア



10秒放置



5秒乾燥



光照射なし



歯科用象牙質接着材  
管理医療機器 228AKBZX00104000

- 「タッチキュア効果」(界面の重合促進効果)が付与されており、強固に支台歯・窩洞に接着します。
- すべての支台歯・窩洞に対応し、塗り分け不要です。

セットする補綴装置の種類	接着強化プライマー
メタルクラウン    メタルインレー    メタルコア	— 不要
ジルコニア    セラミックス	○ 適宜    形成・適合条件等、強固な接着を必要とする症例
CAD/CAM冠    CAD/CAMインレー	● 必要
レジンコア(間接法)	○ 適宜

ジーシー ジーセム ONE EM / ジーセム ONE neo の前処理として「G-プレミオ ボンド」が使用できるようになりました

## G-プレミオ ボンド

10秒放置

5秒乾燥

光照射あり

十分な操作時間




- 光照射により接着する支台歯以外の余剰セメントの除去の操作が余裕を持って行えます。
- ※最終硬化までの時間は、接着強化プライマーを使用した場合と同じです。

レジンコア(間接法)には使用不可  
※根管まで十分に光が届かないため

歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材  
管理医療機器 226AABZX00098000

### 歯質接着強さ

ジーシー研究所測定データ

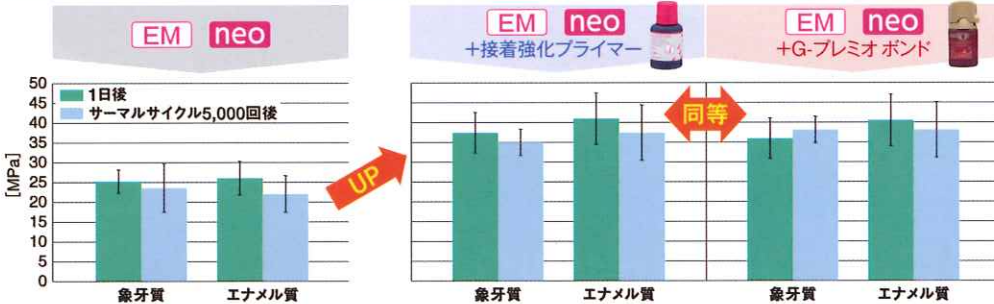

### タッチキュア効果 (重合促進効果)



セメントを支台歯に先に塗布すると、口腔内の温度でセメントの硬化が早まります。必ず補綴修復物側にセメントを塗布し、装着してください。

# 補綴装置の前処理

## G-マルチプライマー



0秒放置



乾燥必要




歯科セラミックス用接着材料  
管理医療機器 228AABZX0003000

- あらゆるマテリアルに対応する接着性モノマーを配合した1液性プライマー
- 補綴装置へのシランカップリング処理が可能。

セットする補綴装置の種類	G-マルチプライマー
メタルクラウン    メタルインレー    メタルコア	— 不要
ジルコニア	○ 適宜    形成・適合条件等、強固な接着を必要とする症例
CAD/CAM冠    CAD/CAMインレー	● 必要
セラミックス    レジンコア(間接法)	

### 各種修復材料に対するせん断接着強さ (EM)

ジーシー研究所測定データ

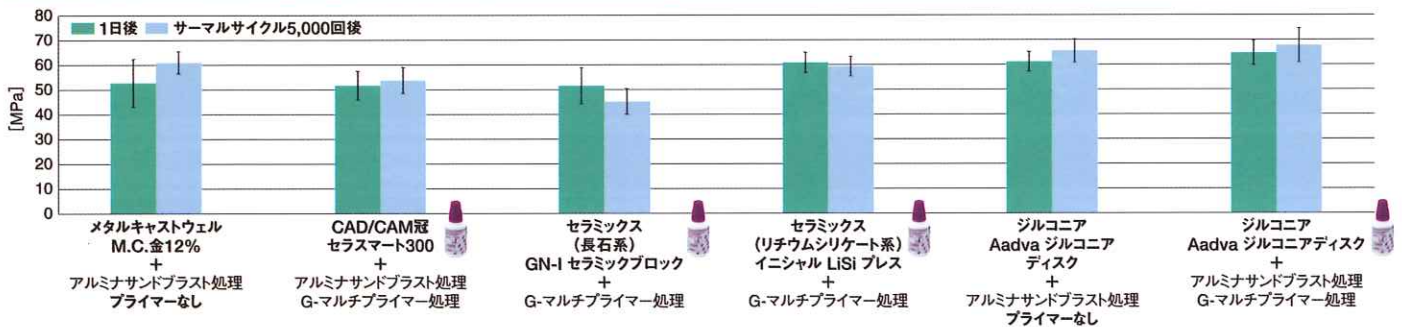

### 株式会社 ジーシー

- 支店 ●東京 (03)3813-5751  
●大阪 (06)4790-7333  
営業所 ●北海道 (011)729-2130  
●東北 (022)207-3370  
●名古屋 (052)757-5722  
●九州 (092)441-1286

### ご用命は

## 株式会社 コサカ

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14  
TEL 03-3557-4111 FAX 03-3557-4116