

【キャンペーン期間】
2024.6.3 → 7.20
数量限定

CAD/CAM形成用バーセット スムーズカット CAD/CAMプレパレーション バーセット



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「CAD/CAM形成用バーセット スムースカット CAD/CAMプレパレーション バーセット」を期間・数量限定で販売いたします。是非、この機会にご用命ください。

「スムーズカット CAD/CAMプレパレーション バーセット」を期間・数量限定で販売いたします！

CAD/CAMインレーからCAD/CAM冠まで

このセットで **形成をモ—ラ** できます！



CAD/CAM形成用バーセット

スムーズカット CAD/CAMプレパレーション バーセット

種類●8種=BR2、BR5、BR6、BR20、PR17、A18、RS1、RS2

包装・希望医院価格●セット1箱=¥10,000

歯科用ダイヤモンドバー ジーシー スムースカット
一般医療機器 23B2X00038000007

前歯・臼歯クラウン形成用



クラウン・
インレー共用
隣接面カット用



インレー窩洞
形成用



咬合面

適度なテーバーと窩洞内面の丸みを付与しながら効率よく形成できます。



RS1

隣接面

隣接面の展開角や隣接マージン部を形成します。




RS2

※製品画像は原寸大ではありません。


	ガイドグループ付与 軸面形成/マージン形成	軸面形成/ マージン形成	舌側咬合面	隣接面 カット	咬合面	隣接面		
	BR2	BR5	BR6	BR20	PR17	A18	RS1	RS2
最大径(mm)	1.6	1.9	2.2	1.9	2.3	1.6	1.6	1.6
最小径(mm)	1.0	1.2	1.5	1.7	1.4	0.5	1.0	0.75
刃部長さ(mm)	8.4	8.0	8.2	5.4	4.7	11.3	4.0	8.0
テーバー度	5°	5°	5°	—	—	6°	8°	6°

「CAD/CAMインレー」における窩洞形成のポイント

■ インレー 〈良い例〉

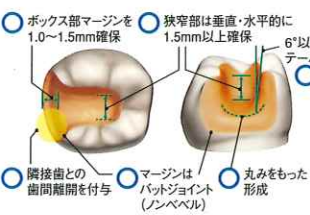


■ インレー 〈悪い例〉

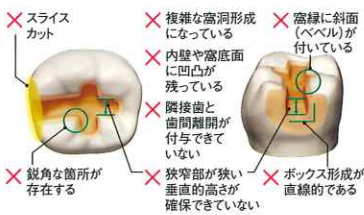


重要
点・線・角が極力できないように、滑らかになるように形成してください。

「CAD/CAM冠」における支台歯形成のポイント


■ 前歯

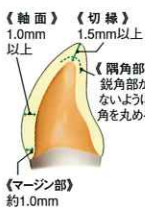

■ 小臼歯 / 大白歯

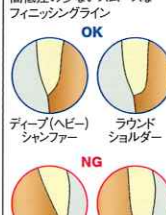

■ 咬合面

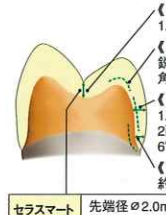

セラスマート クリアランスゲージ
先端径φ2.0mm
先端径φ1.5mm
●咬合面の厚みを簡単に確認できます。

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2024年6月3日～7月20日

貴医院名	ご住所 〒	対象製品	ご注文数
お取引販売店		スムーズカット CAD/CAM プレパレーション バーセット	
ご担当者	様 TEL ()		

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
営業所 ●東北 (022) 207-3370
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

株式会社 **コサカ**

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14
TEL 03-3557-4111 FAX 03-3557-4116